


# Hvordan bytte styringsenhet i batterikassen til Astrix

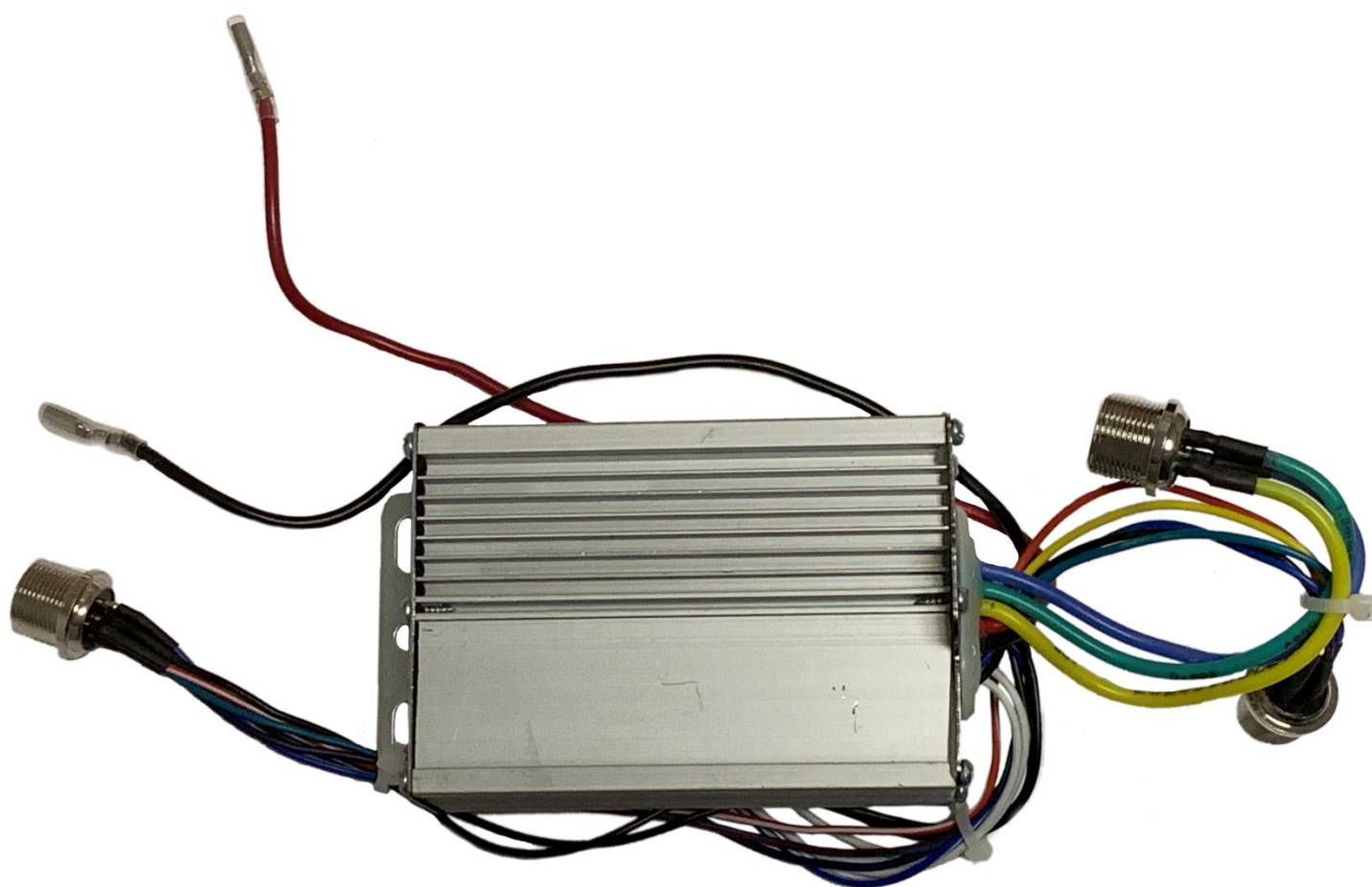

***wee.no***

## Steg 1: Skru av det fremre dekselet

Vi starter forfra og demonterer først det fremste dekselet. Start med å fjerne mutteren som holder kontakten tilkoblet til dekselet.



Fjern mutter, låseskive og gummiheten. Kontakten er nå løs fra dekselet.




Fjern deretter de fire skruene som holder dekslet festet til aluminiumskassen.





Legg merke til hvordan de elektriske ledningene er tilkoblet til Av/På knappen (hovedstrømbryteren). Fjern deretter disse ledningene fra bryteren. Disse er tilkoblet med han/ho tilkoblinger, slik at man kun trenger å dra kontaktflatene fra hverandre, men pass på at man har kontroll på hvilken terminal de ulike ledningene var tilknyttet til.

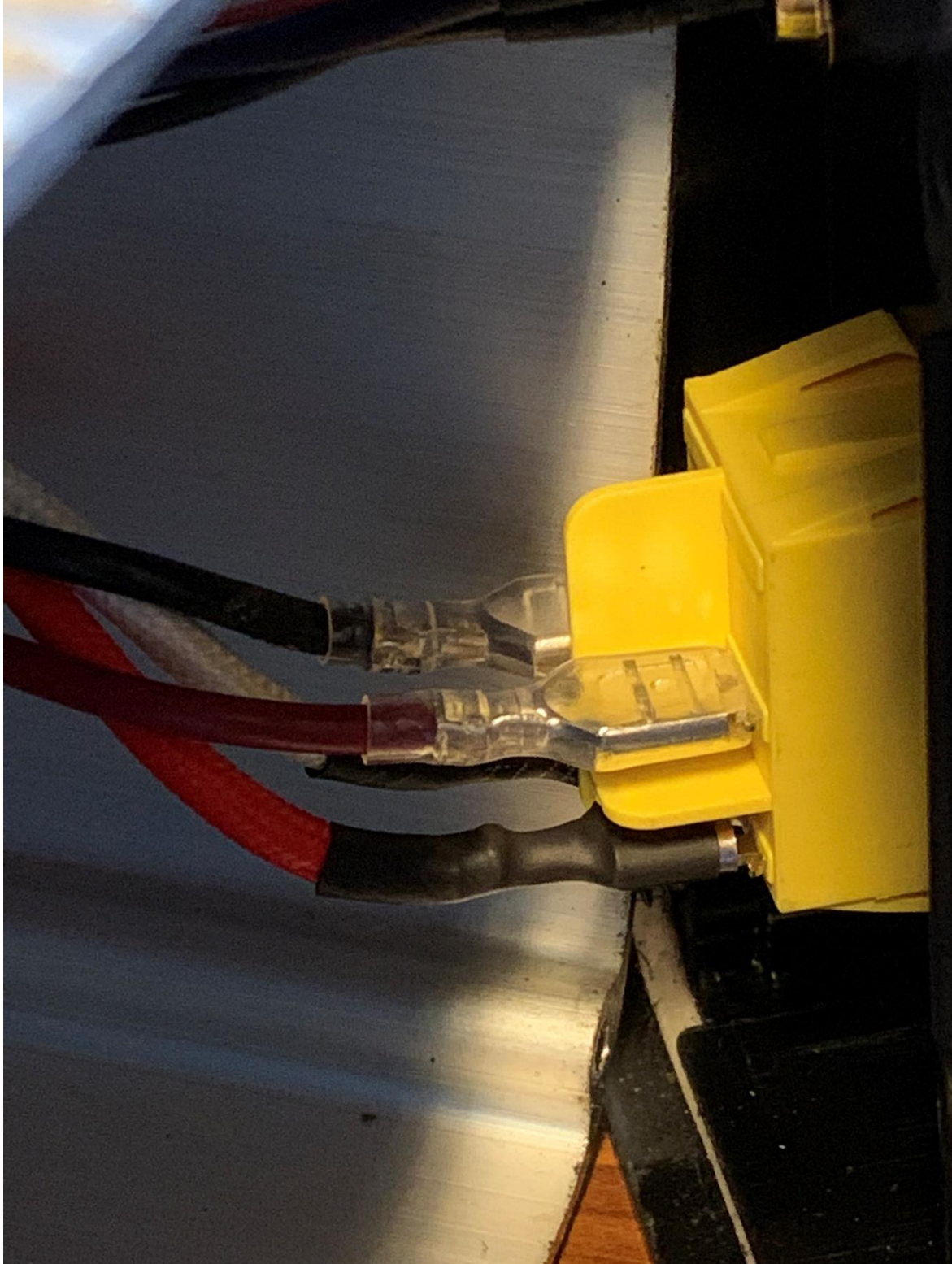

Det fremre dekselet er nå løsnet fra batterikassen.




## Steg 2: Skru av det bakre dekselet

Deretter kan man fjerne det bakre dekselet. Start med å fjerne de to muttrerne som holder de to kontaktene tilkoblet til dekselet. Fjern også her muttrerne, låseskivene og gummihettene. Kontaktene er nå løse fra dekselet.







Fjern deretter de fire skruene som holder dekslet festet til aluminiumskassen.

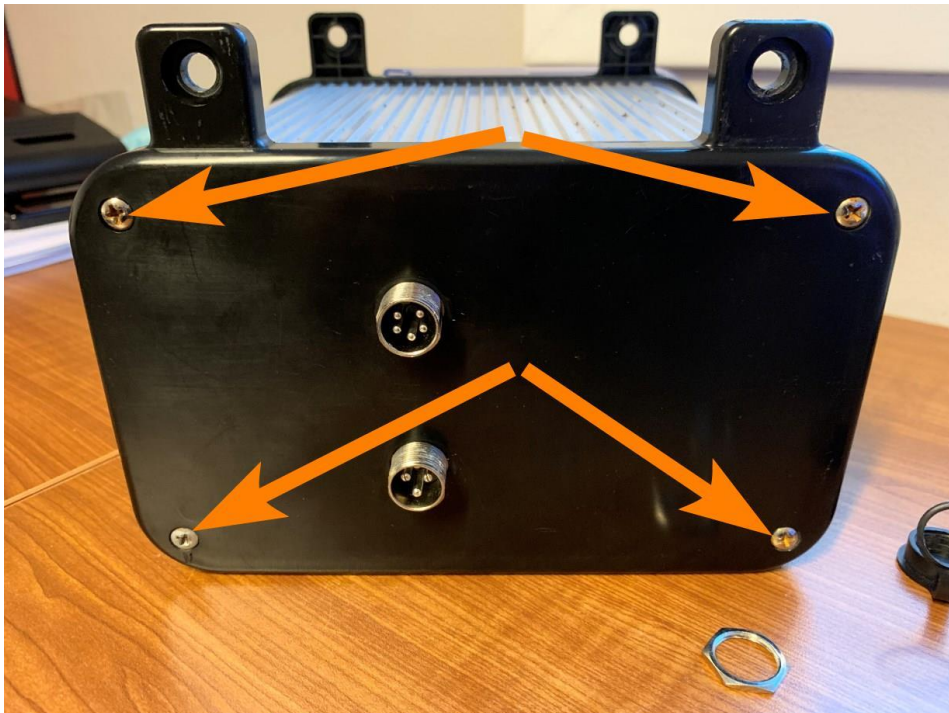

Dekslet er nå løst, og man kan fjerne aluminiumskassen. Legg merke til hvordan aluminiumskassen er orientert. Det er freset ut et spor på innsiden av aluminiumskassen. Batteriet blir festet til dette sporet, og man må derfor sørge for at dette sporet havner på samme plass ved montering. Sporet skal være på motsatt side av styringsenheten.

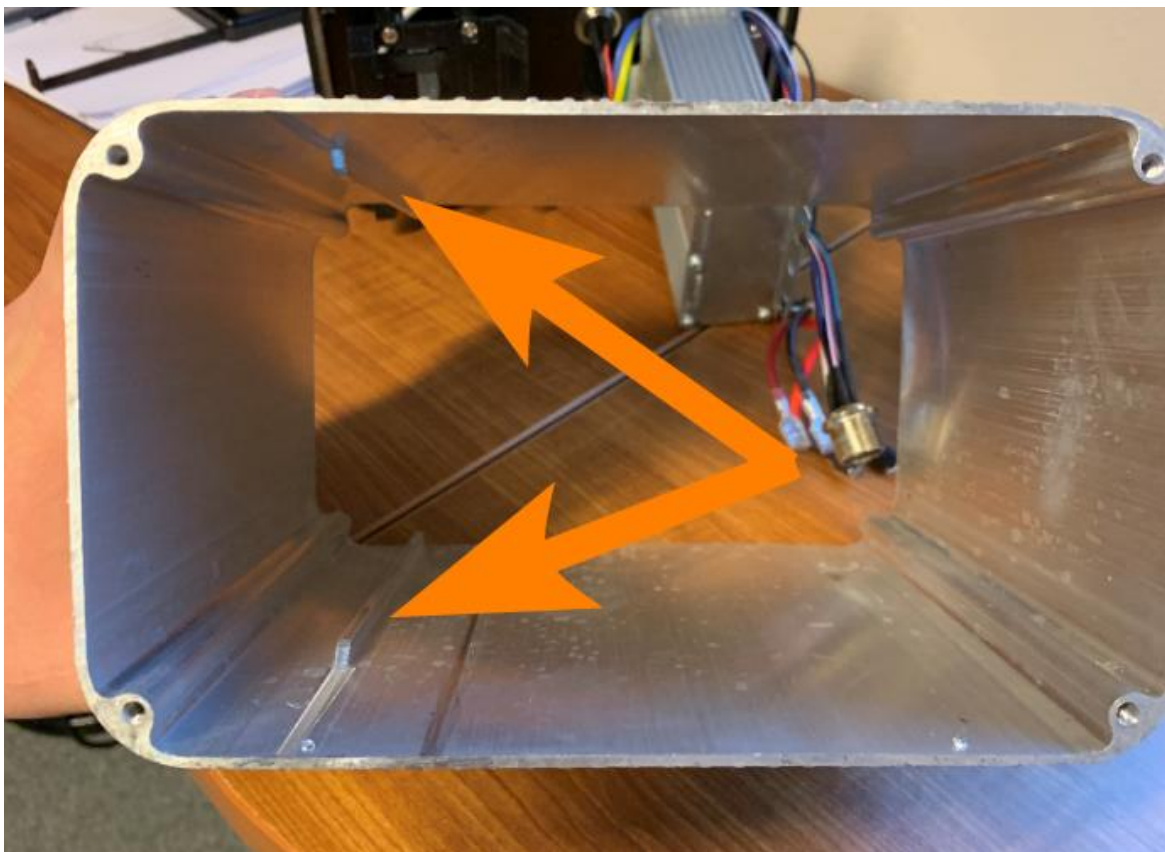

Med aluminiumskassen borte, kan man nå fjerne den gamle styringsenheten. Denne er festet med 3 skruer.

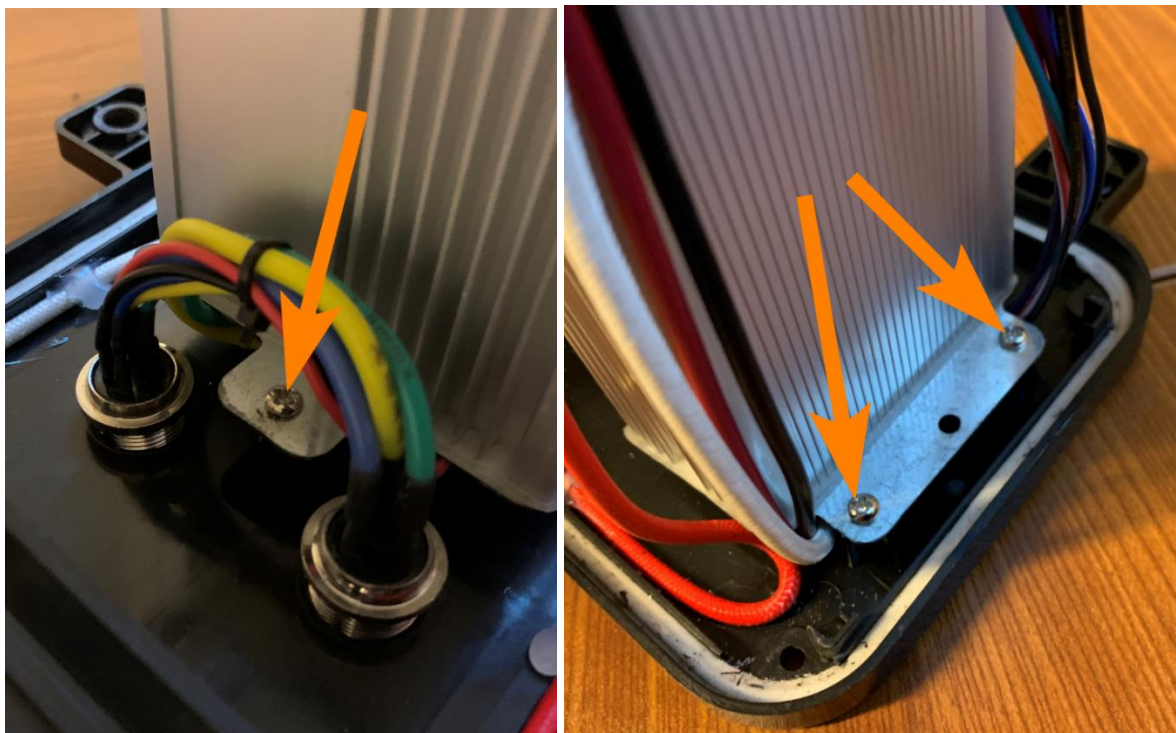

Den gamle styringsenheten er nå fjernet, og man kan nå montere ny styringsenhet. Monteringen gjøres i omvendt rekkefølge.